

CLOVER 10

LOUPE ELECTRONIQUE PORTABLE

Mode d'Emploi

Version 1.0 Juin 2017

Contents

Précaution	1
Démarrage rapide	3
Vue d'ensemble	3
Présentation	5
Accessoires	8
Chargement de la batterie	9
Pied rétractable	12
Operation	14
Bouton marche/arrêt	14
Types de bips sonores	15
Contrôle des bips sonores	15

Switch Camera	16
Agrandissement	16
Modes Bi-couleur	17
Contrôle de la luminosité	20
Eclairage LED	20
Gel de l'image	21
Stockage des images	22
Lignage et fenêtrage	24
Arrêt automatique	27
Specifications	28
Condition de garantie	29

Précaution



Avant d'utiliser Clover 10 pour la première fois, vous devez charger la batterie. Référez-vous à la section Chargement de la Batterie, pour plus de détail.



L'appareil doit être utilisé et range dans un environnement où la température est entre 10 et 35°C.



Protégez Clover 10 de l'humidité, la pluie et de toutes autres sources de liquide. Ne trempez jamais l'appareil.



Ne tentez pas de réparer vous-même l'appareil sous peine de perdre les effets de la garantie. Contactez votre revendeur en cas de problème.



Utilisez uniquement le chargeur et la batterie du fabricant.


Démarrage rapide

Vue d'ensemble


Merci d'avoir choisi Clover 10.

Clover 10 est une video-loupe portable 10 pouces doté d'un excellent écran Full HD qui produit une qualité d'image exceptionnelle en temps réel même en le déplaçant ou en changeant le grossissement en continu de 2.5X to 18X. Le système intégré à 2 caméras offre 3 modes pour satisfaire à un usage quotidien. Par exemple : vision de près pour lire le journal, vue à distance pour voir un poster et vue miroir pour vous contempler.

En plus des fonctions de zoom et de mode couleur, il possède aussi des fonctions pratiques telles que la ligne de lecture et le masque, le gel d'images et le stockage, la recherche et la navigation

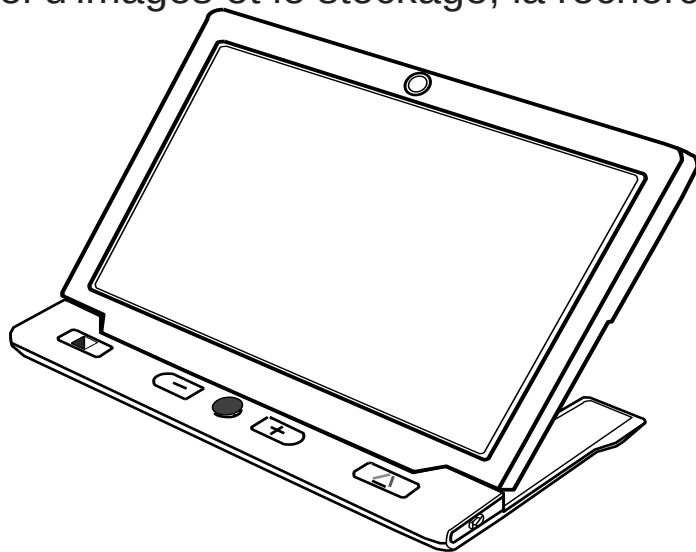

Présentation

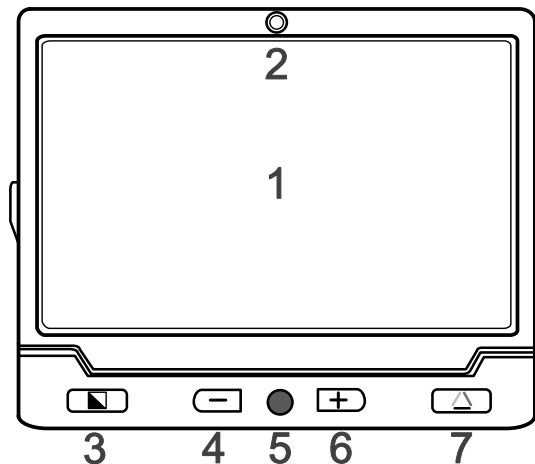

1. Ecran LCD

2. Camera avant


3. Modes Bicolore

4. Zoom moins

5. Joystick

6. Zoom plus


7. Couleur réelle

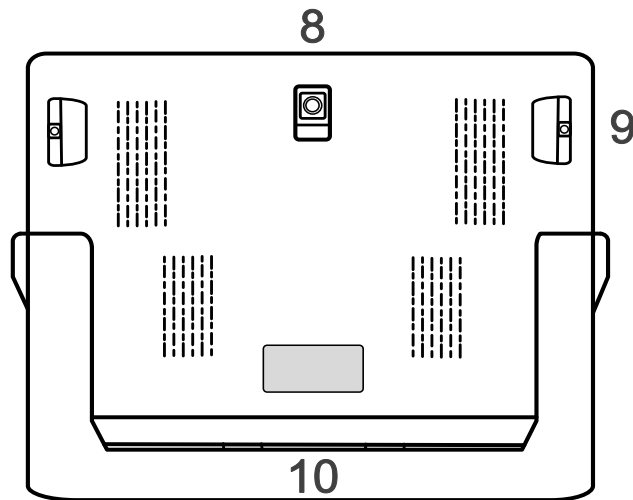

8. Camera arrière

9. Eclairage LED s

10. Pied

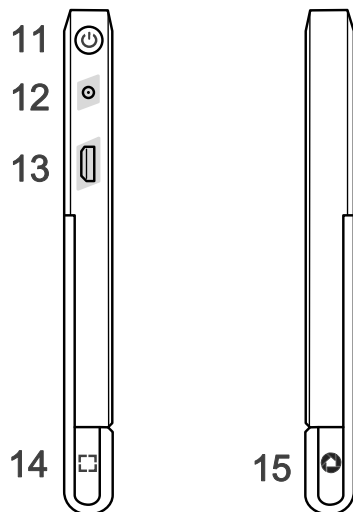

11. Bouton d'allumage

12. Port du chargeur


13. Port HDMI

14. Bouton localiser

15. Bouton Gel image

16. Bascule caméra


17. Port USB

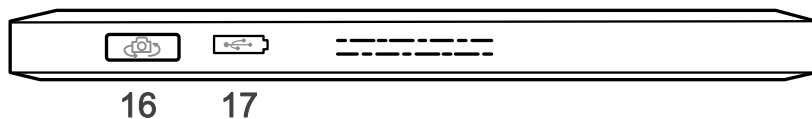


Accessoires



Mode d'emploi

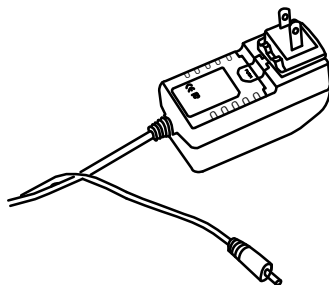


Chargeur

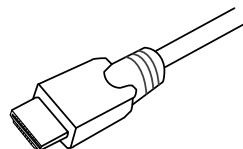

Câble HDMI




Chiffonnette

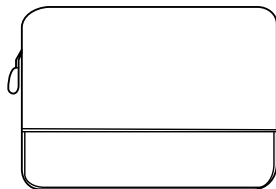

Etui

Chargement de la batterie

1. Connectez le chargeur sur l'appareil (photo 12).
2. Branchez l'appareil sur une prise murale and le chargement commencera.

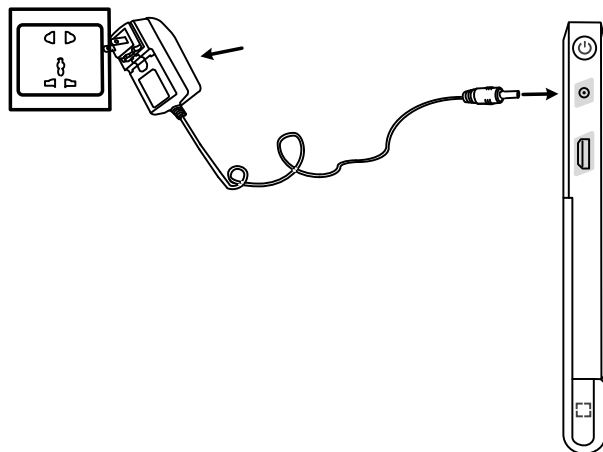

Eclairage LED

- Chargement lorsque l'appareil est éteint, le voyant d'alimentation est jaune, puis éteint automatiquement

lorsqu'il est complètement chargé. La charge complète prend environ 5 heures pour une autonomie de 3 heures.


- Lorsque l'appareil est sous tension, la LED d'alimentation est jaune.
- Lorsque l'appareil est allumé sans charger, le voyant d'alimentation est jaune tant que le niveau de la batterie est élevé et sera rouge lorsque la batterie sera faible. Lorsque la lumière rouge commence à clignoter, c'est un signal pour charger la batterie. Vous pouvez contrôler le niveau de batterie en pressant le bouton d'allumage.

Pied rétractable

Le pied rétractable est conçu pour lire et écrire à l'arrière de l'appareil.

Lorsque le pied est déplié, la camera fonctionne en mode vision de près par défaut.

Lorsque le pied est replié la caméra fonctionne en vision de loin automatiquement pour une distance de 4 mètres environ au maximum.

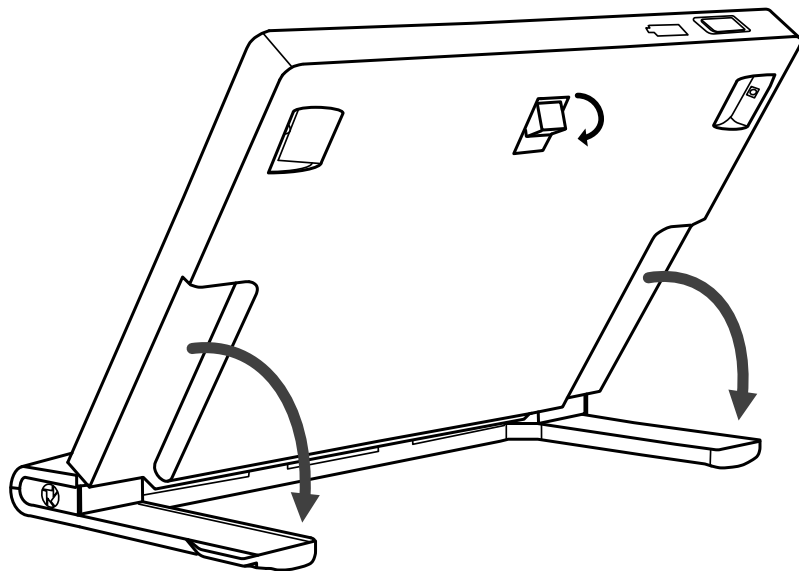

Operation

Bouton marche/arrêt

- ☐ Appuyez 5 secondes sur le bouton  pour allumer ou éteindre l'appareil.

- ☐ Lorsque l'appareil est allumé, pressez  pour contrôler le niveau de batterie et accéder à d'autres fonctions.

Types de bips sonores

- Indiquant marche/arrêt.
- Lorsque vous utilisez un bouton.
- Lorsque le niveau de batterie s'affaiblit.

Contrôle des bips sonores

- ☐ Appuyez et maintenez quelques secondes le bouton  et pressez the bouton  pour activer/désactiver les bips sonores.

Switch Camera

- ☐ Poussez le commutateur de caméra  vers la gauche pour ouvrir la caméra arrière pour la vue de près et la vue à distance.
- ☐ Poussez le commutateur  de la caméra vers la droite pour ouvrir le mode miroir.

Agrandissement

- ☐ Appuyez sur le bouton de zoom  pour augmenter l'agrandissement et maintenez-le pour un agrandissement continu.

- ❑ Appuyez sur le bouton zoom — pour diminuer l'agrandissement et maintenez-le pour une diminution continue.
- L'agrandissement est de 2.5x à 18x en vision de loin et en vision de près.

Modes Bi-couleur

Un mode bi-couleur est une combinaison de couleurs prédéfinie.

Le mode couleur est préférable pour afficher des images ou des photos.

Le mode de contraste amélioré est combiné avec différentes couleurs de fond et d'arrière-plan qui peuvent aider à lire plus clairement.

- ☐ Enfoncez le bouton  pour choisir parmi les modes bi-couleur programmés.
- ☐ Appuyez sur le bouton  pour utiliser le mode couleur.
- ☐ Appuyer durant 5 secondes sur le bouton  permet de basculer de la liste simple à la liste étendue des combinaisons de couleur.

Liste simple des 5 modes Bi-couleur

- | | |
|--|--|
| ☒ Blanc sur noir | ☒ Noir sur blanc |
| ☒ Jaune sur noir | ☒ Blanc sur bleu |
| ☒ Jaune sur bleu | |

Liste complète des 18 modes Bi-couleur

- | | |
|---|---|
| ☒ Blanc sur noir | ☒ Noir sur blanc |
| ☒ Jaune sur noir | ☒ Noir sur jaune |
| ☒ Blanc sur bleu | ☒ Bleu sur blanc |
| ☒ Jaune sur bleu | ☒ Bleu sur jaune |
| ☒ Vert sur noir | ☒ Noir sur vert |
| ☒ Violet sur noir | ☒ Noir sur Violet |
| ☒ Bleu sur noir | ☒ Noir sur bleu |
| ☒ Blanc sur vert | ☒ Vert sur blanc |
| ☒ Blanc sur rouge | ☒ Rouge sur noir |

Contrôle de la luminosité

La luminosité de l'écran peut être réglée tant en mode couleur qu'en mode contraste amélioré.

- ☐ Pressez et maintenez le bouton  et appuyez sur le bouton Zoom  pour augmenter la luminosité.
- ☐ Pressez et maintenez le bouton  et appuyez sur le bouton Zoom  pour diminuer la luminosité.

Eclairage LED

- ☐ Pressez et maintenez le bouton  et appuyez sur le Bouton Gel de l'image  pour active/désactiver l'éclairage, notamment pour les documents brillants créant un reflet.

Gel de l'image

- ☐ Le Gel de l'image sur l'écran peut être utile pour une lecture plus approfondie. À ce stade, le grossissement ainsi que le changement de couleur sont possibles pour une meilleure expérience.
- ☐ Pressez le bouton Gel de l'image  pour figer l'image.
- ☐ Pressez à nouveau le bouton Gel de l'image  pour débloquer l'image.
- ☐ Lorsque l'image est figée, vous pouvez utiliser le Joystick  pour vous déplacer dans l'image figée.

Stockage des images

- ☐ Appuyez durant 3 secondes sur le bouton Gel de l'image  pour stocker l'image en cours. Vous pouvez stocker jusqu'à 18 images.
- ☐ Lorsque les images enregistrées atteignent la valeur maximale (18 images, l'icône complète de la mémoire apparaît), vous devez d'abord supprimer certaines images en mode Lecture avant la prochaine sauvegarde réussie.

Voir les images sauvegardées

- ☐ Faites un appui long sur le bouton Couleur .

- ❑ Utilisez le Joystick  pour choisir l'image dans la galerie. Appuyez à nouveau sur le bouton Couleur  pour voir l'image. Vous pouvez vous déplacer dans l'image choisie en utilisant la même manipulation décrite dans la section Gel de l'image. Appuyez sur le bouton Gel de l'image  pour revenir à la galerie.

- ❑ Pressez le bouton Localisateur  pour choisir l'image que vous souhaitez supprimer. Pressez une deuxième fois sur ce bouton pour confirmer la suppression ou appuyez sur un autre bouton pour annuler l'opération.

- ❑ Appuyez durant 3 secondes sur le bouton Couleur  pour sortir du mode Voir les images sauvegardées.

Lignage et fenêtrage

Appuyez sur le bouton localisateur  pour obtenir les différentes lignes :

- Ligne horizontale réglable avec le Joystick 
- Ligne vertical réglable avec le Joystick 
- Fenêtrage horizontal réglable avec le Joystick 
- Sans ligne et sans fenêtrage.


- ❑ Appuyez sur le bouton  pour sortir du mode Lignage et fenêtrage.

Mémorisation

Clover 10 mémorise automatiquement les derniers paramètres utilisés tels que le mode couleur, l'agrandissement, les sons lorsque vous rallumez l'appareil.

Sortie HDMI

Branchez l'appareil sur un écran avec le câble HDMI pour obtenir un affichage encore plus grand..

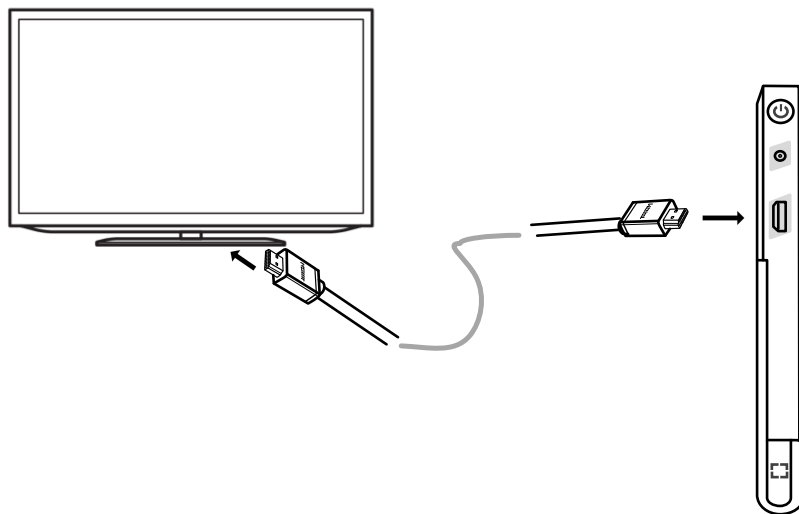

Arrêt automatique

Si vous n'utilisez pas l'appareil durant 3 minutes, il s'éteindra automatiquement.

Specifications

- **Ecran:** LCD 10 pouces Haute Définition
- **Camera:** Auto Focus, HD
- **Dimension** <= 24,5*20*2,2cm
- **Poids:** <=680 grammes
- **Agrandissement :** 2.5x à 18x
- **Batterie** Intégrée rechargeable Lithium; 3 heures continues après 5 heures de charge
- **Alimentation:** Entrée: 110-240V; Sortie : 5V/3A

Condition de garantie

Etex France est reconnue pour la qualité de ses produits et de ses services. Avant toute expédition, les appareils sont vérifiés et contrôlés à plusieurs niveaux par le service technique.

L'appareil est garanti contre tous les défauts matériels et de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et conformément aux instructions données dans le présent mode d'emploi. La garantie couvre les pièces et la main d'oeuvre. Vous devez garder l'emballage d'origine pour respecter la condition de garantie. ETEX France ne peut pas fournir des emballages pour les réparations sous garantie. En cas de panne, l'acheminement de l'appareil reste à la charge de l'utilisateur.

En cas de panne, veuillez-vous rapprocher de votre revendeur pour la prise en charge de la garantie.

La garantie ne couvre pas :

- a) L'acheminement de votre appareil vers nos ateliers
- b) Les défauts ou dommages de détournement, utilisé d'une autre façon normale et habituelle, accidentelle ou négligence ;
- c) Les défauts ou dommages causés par une mauvaise opération, maintenance, installation, ajustement, altération ou modification ;
- d) Les défauts ou dommages causés par les déversements d'aliments ou de liquides ;

e) Toute la surface en plastique et tous les autres éléments extérieurs qui sont rayés ou endommagés en raison d'une utilisation normale ;

f) Les dommages dûs au fonctionnement de l'appareil avec des équipements qui ne sont pas fournis par ETEX France.

Vous devez fournir une preuve d'achat, portant la date d'achat, afin de recevoir le service de garantie. Toute personne utilisant ce produit est consciente de certains risques, en raison de la nécessité d'utiliser des appareils de basse Vision.

Service après-vente

Dans le cas où le support technique est nécessaire, veuillez contacter le service après-vente de la société Etex France au 01 55 78 25 00 du Lundi au Vendredi, entre 10h et 17h ou par mail à support@etexfrance.fr pour obtenir un numéro d'autorisation de retour.

Les réparations y compris sous garantie seront refusées sans numéro d'autorisation de retour valide.



9-11 avenue Ledru Rollin 75012 PARIS
Tel 33 1 55 78 25 00 Fax 33 1 55 78 25 05
info@etexfrance.fr